


BỘ DỤNG CỤ LẤY MÁU GÓT CHÂN BẰNG KIM TỰ ĐỘNG

1. Giới thiệu bộ dụng cụ lấy máu gót chân



Bộ dụng cụ lấy máu gót chân được đóng thành từng gói, mỗi gói có đầy đủ các dụng cụ sau đây:

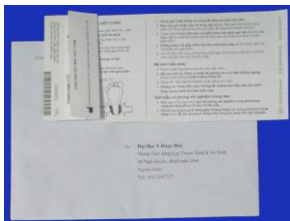

1. Phiếu gửi mẫu và phong bì gửi mẫu

- Số lượng: 01 phong bì, 01 phiếu gửi mẫu
- Phong bì đã được in sẵn địa chỉ Trung tâm Sàng lọc – Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh – Đại học Y Dược Huế
- Phiếu gửi mẫu và hướng dẫn điền thông tin trên phiếu gửi mẫu như đã giới thiệu ở phần **Phụ lục 1**



2. Găng tay lấy mẫu

- Quy cách: găng tay không bột
- Số lượng: 01 đôi (2 chiếc)



3. Gạc

- Quy cách: Gạc vô trùng
- Số lượng: 02 cái



4. Bông

- Quy cách: sát khuẩn bằng Isopropyl Alcohol 70%
- Số lượng: 02 cái




5. Kim chích máu

- Quy cách: sử dụng 01 lần
- Hãng sản xuất: HERENZ của Đức
- Số lượng: 01 cái

2. Hướng dẫn sử dụng kim chích máu

2.1. Cấu tạo kim chích máu

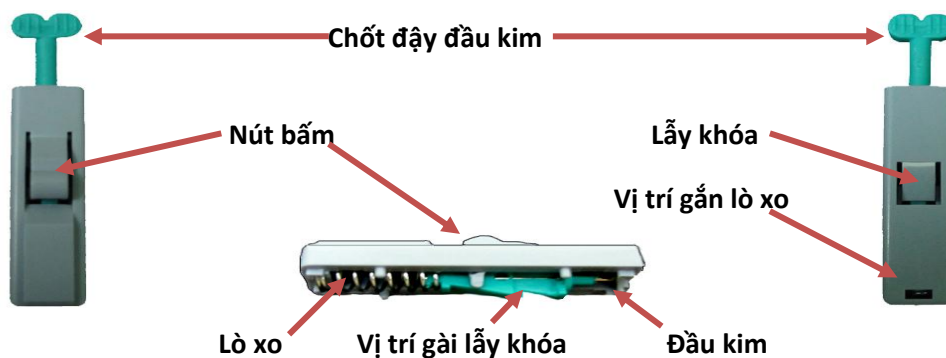

2.2. Cách sử dụng kim chích máu

Bước 1:




- Mang găng tay, chuẩn bị sẵn sàng mẫu giấy thấm (đã điền đầy đủ thông tin) và các dụng cụ khác dùng cho lấy máu gót chân.
- Lấy kim chích máu ra khỏi bộ dụng cụ, cầm kim bằng ngón cái và ngón giữa, ngón trỏ đặt tại chốt đẩy đầu kim, **hướng mặt lấy khóa lên trên**.

Bước 2:



- Dùng ngón trỏ nhấn chốt đẩy đầu kim xuống cho đến khi nghe tiếng “tách”.
- Mắt quan sát khe lấy khóa, thấy lấy khóa đã gài vào đúng vị trí.

Bước 3:

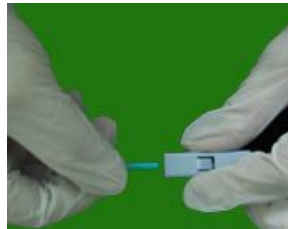

- Dùng ngón cái và ngón trỏ giữ kim chích (Lưu ý: **chỉ cầm 2 mặt bên thân kim, không chạm vào nút bấm và lấy khóa**).
- Tay còn lại cầm chốt đẩy đầu kim, **nhẹ nhàng** rút chốt ra khỏi đầu kim. Tránh rút quá mạnh làm bung lấy khóa.

Bước 4



- Cầm kim chích máu bằng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa: **ngón trỏ đặt dọc theo thân kim, ngón cái đặt nhẹ lên nút bấm, ngón giữa làm điểm tựa**.

Bước 5:



- Một tay giữ chân trẻ, hướng vị trí chích máu ra ngoài.
- Tay kia cầm kim chích máu áp sát khe hở đầu kim lên vị trí chích máu
- Nhấn nút bấm từ từ cho đến khi nghe tiếng “tách” thì rút kim ra và chuẩn bị thấm máu.